

Hjärtstartare hos Knivstahus nr 3



En hjärtstartare installerades på gaveln utanför föreningslokalen i augusti 2024.

Hjärtstartaren skall kunna användas utan någon formell utbildning men för att göra er lite mera bekanta med utrustningen så presenteras här en kort information.



Väskan finns i ett skåp som larmar när man öppnar luckan, för att tysta larmet så stänger man bara luckan igen.

Förutom själva laddstartaren så innehåller väskan även sårkompresser, torkservetter, sax för att klippa upp kläder, ett plastskydd som kan användas vid inblåsningar under HLR, ett rakblad för att, om nödvändigt, avlägsna kroppshår när man skall fästa elektroder.

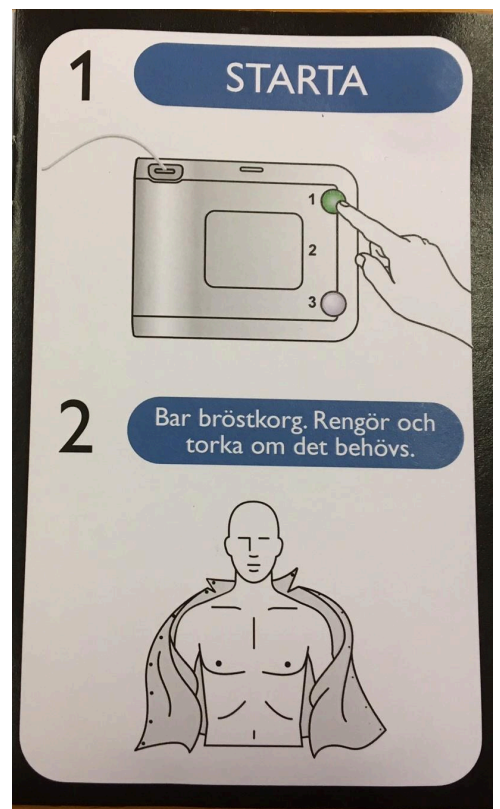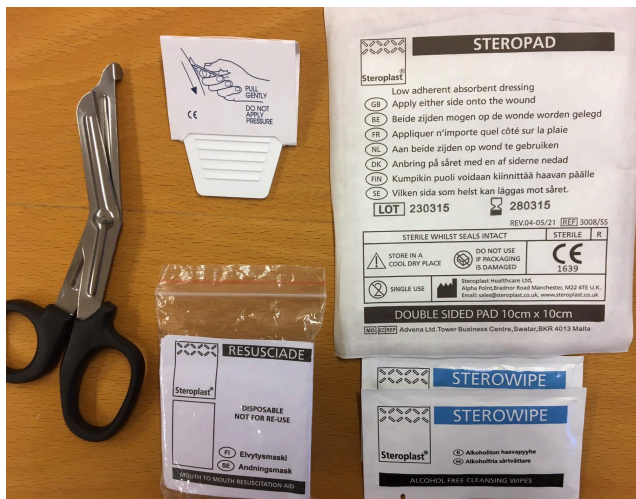


Instruktionerna för själva hanterandet är enkelt och apparaten kommunicerar vad den vill att man skall göra.

Kontrollera om tecken på plötsligt hjärtstillestånd finns:
 Reagerar inte Andas inte normalt

1 STARTA



2 PLACERA ELEKTROD-ERNA



3 TRYCK PÅ DEFIBRILLERINGS-KNAPPEN



SNABBREFERENS

3 Öppna det grå plastfodralet.



4 Dra bort elektroderna.



5 Placera elektroderna på bröstkorgen.



6 Analyserar ... Gå åt sidan

VÄNTA TILLS  SLUTAR BLINKA



7 Tryck på den blinkande orange defibrilleringsknappen.



8 Om du vill ha hjälp med hjärt-lungräddning: Tryck på den blinkande blå knappen.



BARN OCH SPÄDBARN
< 25 kg/55 lbs (0-8 år)

Sätt i nyckeln vid början av återupplivningen.



Placera elektroderna på ryggen och bröstkorgen.



BARN OCH SPÄDBARN

Mera information om hjärtstartaren finns på tillverkarens Youtube:
<https://youtu.be/eJsRm91bEpl?si=VSQyppAl80He0Z2E>