

Hjärtstartare hos Knivstahus nr 3

En hjärtstartare installerades utanför föreningslokalen i augusti 2024.



Hjärtstartaren skall kunna användas utan någon formell utbildning men för att göra er lite mera bekanta med utrustningen så presenteras här en kort information.

Väskan finns i ett skåp som larmar när man öppnar luckan, för att tysta larmet så stänger man bara luckan igen.

Förutom själva laddstartaren så innehåller väskan även sårkompresser, torkservetter, sax för att klippa upp kläder, ett plastskydd som kan användas vid inblåsningar under HLR, ett rakblad för att, om nödvändigt, avlägsna kroppshår när man ska fästa elektroderna.

Instruktionerna för själva hanterandet är enkelt och apparaten kommunicerar vad den vill att man ska göra.




3

Öppna det grå plastfodralet.




4

Dra bort elektroderna.

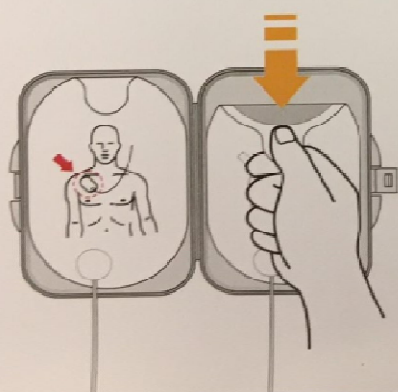

5

Placera elektroderna på bröstkorgen.

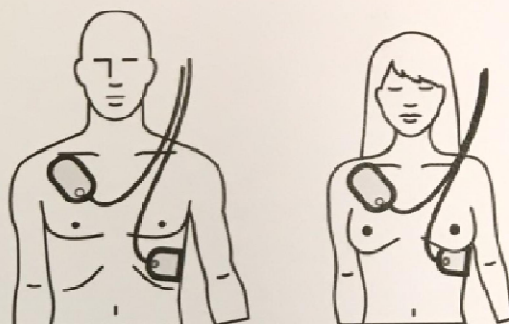

6

Analyserar ... Gå åt sidan

VÄNTA TILLS



SLUTAR BLINKA




7


Tryck på den blinkande orange defibrilleringsknappen.



8

Om du vill ha hjälp med hjärt-lungräddning: Tryck på den blinkande blå knappen.

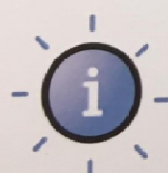

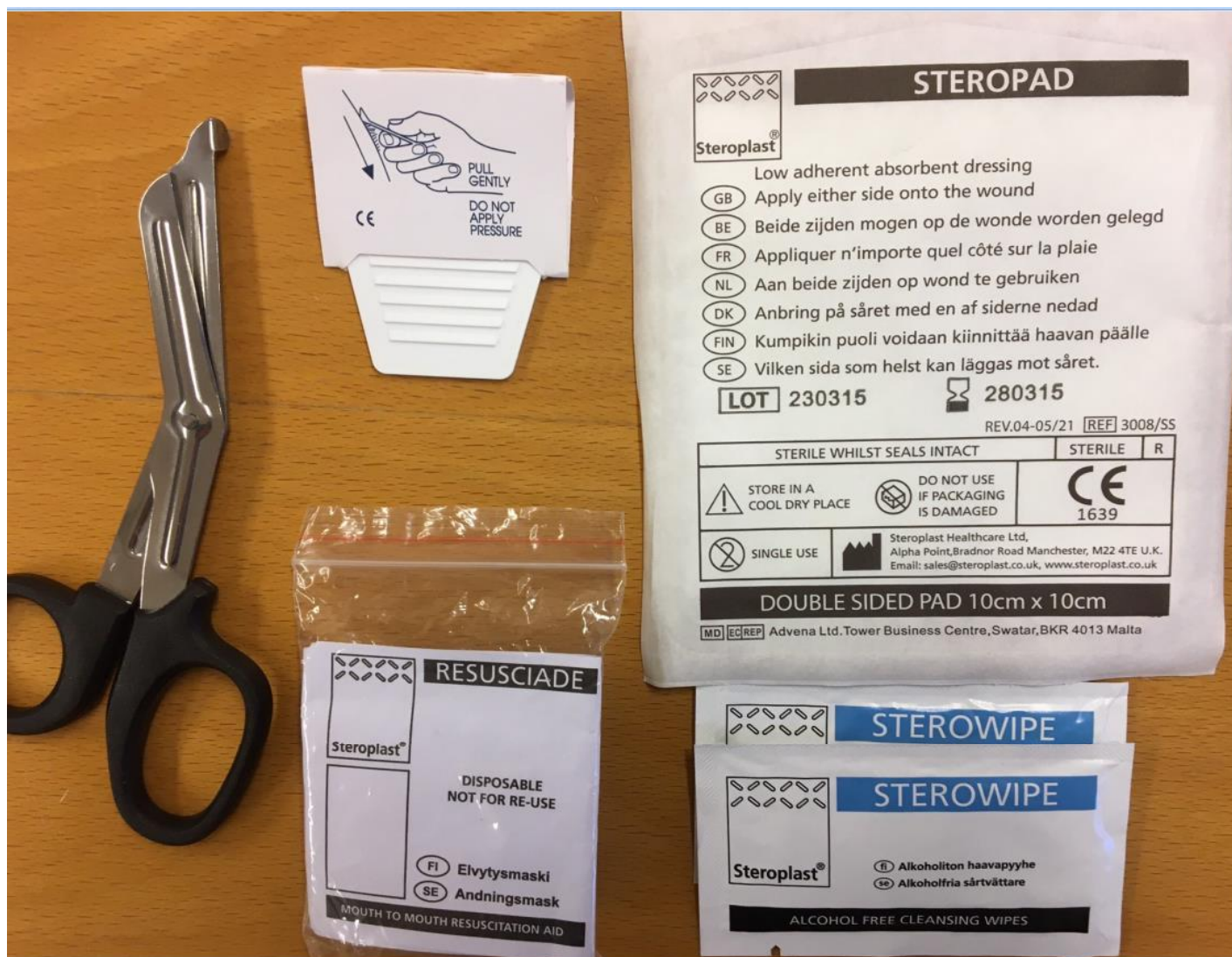

Mera information om hjärtstartaren finns på tillverkarens Youtube:

<https://youtu.be/eJsRm91bEpl?si=VSQyppAI80He0Z2E>